

FICHE TECHNIQUE / TECHNICAL SHEET

# StoreProtect Plus®

Récipient avec la solution pour perfusion et préservation d'organes pour la transplantation /  
Container with perfusion and preservation solution for organs intended for transplantation /  
Solution de conservation pour rein, foie, pancreas /  
Preservation solution for kidney, liver, pancreas


Dispositif Médical de classe III / Class III Medical Device



SPRT-P2000/en/2021/09/22

Page 1/1

REF SPRT-P2000

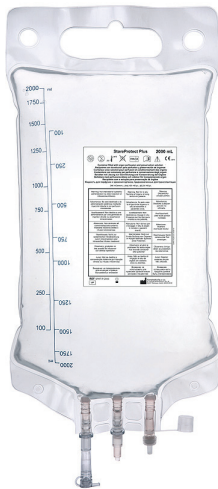

La solution de conservation d'organes StoreProtect Plus® est limpide, stérile et apyrogène. La solution StoreProtect Plus® est destinée au rinçage, transport et à la préservation hypothermique d'organes (rein, foie, pancréas). La solution StoreProtect Plus® est de type extracellulaire, et contient comme colloïde le polyéthylène glycol (PEG). La solution StoreProtect Plus® est utilisée pour maintenir l'organe dans des conditions idéales de conservation du prélèvement chez le donneur jusqu'à transplantation éventuelle chez un receveur.

The StoreProtect Plus® Organ Preservation Solution is clear to light yellow, sterile and pyrogen-free solution for hypothermic flushing, transport, and storage of abdominal organs (liver, kidney, and pancreas). The StoreProtect Plus® Solution, an extra-cellular colloid solution with polyethylene glycol (PEG) as colloid polymer, is used to maintain the organ in optimal conditions from the time of removal from the donor until transplantation into a recipient.

### Solution StoreProtect Plus®

Lactobionic acid	35.8 g
Adenosine	1.336 g
Allopurinol	0.136 g
Glutathion	0.922 g
Polyethylene glycol (PEG 35)	1 g
Potassium dihydrogen phosphate	3.402 g
Raffinose, 5H <sub>2</sub> O	17.84 g
Magnesium sulphate, 7H <sub>2</sub> O	1.232 g
Sodium Hydroxide	qs pH: 7.4
Water for injection	qs 1000 ml

### Poche/bag

Poche multicouche transparente EVA  
/ Transparent multi-layer bag EVA

EVA en contact avec le liquide / EVA solution contact layer

Latex free

DEHP free

3 ports: 1 site de remplissage / Filling port  
1 site d'injection / Injection port  
1 site de percutage / Spike port

### CONDITIONNEMENT / PACKAGING:

Poche de 2 litre / 2 Liter bag

5 poches par carton / 5 bags per carton

1 notice d'instruction par carton / 1 instruction for use per carton



Dispositif Médical / Medical Device

### FABRICANT / MANUFACTURER:

Carnamedica Sp. z o.o.  
ul. Olszynki Grochowskiej 21 lok. U6  
04-281 Warszawa  
Polska  
Phone +48 608336159  
www.carnamedica.com  
Email: office@carnamedica.com

ISO 13485 Rev. 2016 AC 090MD/1852/44392019 Certified Manufacturer

### STERILISATION / STERILIZATION: Détruire après usage / Destroy after used

Durée de péremption: 18 mois /

Expiration date: 18 months



Sterile (Remplissage aseptique /  
Aseptic filling)



Usage unique / Single use.



Ne pas utiliser si endommagé /  
Do not use if damaged.

### STOCKAGE / STORAGE:



Stockage à l'abri de la lumière directe /  
Store in a place away from direct sunlight.



Stockage entre +2°C et +25°C /  
Store solution between +2°C and +25°C.