

FICHE TECHNIQUE / TECHNICAL SHEET

# PlegiStore®


Réceptif avec la solution pour perfusion et préservation d'organes pour la transplantation /  
Container with perfusion and preservation solution or organs intended for transplantation /  
Solution de conservation pour rein, foie, pancreas, coeur, poumon /  
Preservation solution for kidney, liver, pancreas, heart, lung

Dispositif Médical de classe III / Class III Medical Device



PLST-2000/en/2021/01/06  
Page 1/1

REF PLST-2000

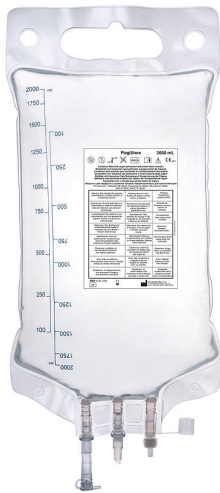

PlegiStore® est une solution hypothermique, claire, stérile et apyrogène. Elle est utilisée pour le rinçage, le stockage et le transport des organes solides (coeur, poumon, rein, foie et pancréas). PlegiStore® est une solution de type extra-cellulaire à faible viscosité. Elle permet le maintien de l'organe dans des conditions optimales entre le prélèvement et la transplantation chez le receveur.

The PlegiStore® Organ Preservation Solution is clear, sterile and pyrogen-free solution for hypothermic flushing, transport, and storage of abdominal organs (liver, kidney, heart, lungs and pancreas). The PlegiStore® is an extra-cellular solution with low viscosity and it is used to maintain the organ in optimal conditions from the time of removal from the donor until transplantation into a recipient.

### Solution PlegiStore®

sodium chloride	0.8766 g
potassium chloride	0.6710 g
magnesium chloride · 6 H <sub>2</sub> O	0.8132 g
histidine hydrochloride · H <sub>2</sub> O	3.7733 g
histidine	27.9289 g
tryptophan	0.4085 g
mannitol	5.4651 g
calcium chloride · 2 H <sub>2</sub> O	0.0022 g
potassium hydrogen 2-oxopentandioate	0.1842 g
(synonym: potassium hydrogen 2-ketoglutarate)	
Potassium hydroxide 2N to pH adjustment	q.s.
Water for injection	q.s. 1000 ml

### Poche/bag

Poche multicouche transparente EVA  
/ Transparent multi-layer bag EVA

EVA en contact avec le liquide / EVA solution contact layer

Latex free

DEHP free

3 ports: 1 site de remplissage / Filling port

1 site d'injection / Injection port

1 site de percutané / Spike port

### CONDITIONNEMENT / PACKAGING:

Poche de 2 litre / 2 Liter bag

5 poches par carton / 5 bags per carton

1 notice d'instruction par carton / 1 instruction for use per carton



Dispositif Médical / Medical Device

### FABRICANT / MANUFACTURER:



Carnamedica Sp. z o.o.  
ul. Olszynki Grochowskiej 21 lok. U6  
04-281 Warszawa  
Polska  
Phone +48 608336159  
www.carnamedica.com  
Email: office@carnamedica.com

### STERILISATION / STERILIZATION: Détruire après usage / Destroy after used

Durée de péremption: 12 mois /

Expiration date: 12 months



Sterile (Remplissage aseptique /  
Aseptic filling)



Usage unique / Single use.



Ne pas utiliser si endommagé /  
Do not use if damaged.

### STOCKAGE / STORAGE:



Stockage à l'abri de la lumière directe /  
Store in a place away from direct sunlight.



Stockage entre +2°C et +15°C /  
Store solution between +2°C and +15°C.

ISO 13485 Rev. 2016 AC 090MD/1852/44392019 Certified Manufacturer